

Borsa per Acqua Calda

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Modello "PLUS" BS Standard 1970:2012



Caratteristiche:

Il suo utilizzo dona sollievo a portata di mano. L'elevata qualità ed il forte spessore della gomma assicurano la massima robustezza ed un sicuro utilizzo quando sono rispettate tutte le avvertenze sotto riportate.

La borsa dell'acqua calda è uno strumento che aiuta a donare sollievo nei casi di dolori causati da contratture, crampi, dolori mestruali, dolore addominale o coliche renali.

Prodotta in pura gomma. Non ingiallisce e non si sbriciola. Colore blu. La capacità totale della borsa è di 2 litri.*

AVVERTENZE:

- **NON USARE ACQUA BOLLENTE. VERSARE L'ACQUA ALL'INTERNO DELLA BORSA USANDO PREFERIBILMENTE UN IMBUTO.**
- **RIEMPIRE SOLAMENTE PER UN MASSIMO DI $\frac{3}{4}$ DELLA SUA CAPACITÀ.***
- **AVVITARE BENE IL TAPPO AVENDO CURA DI ESPELLERE TUTTA L'ARIA RESIDUA RIMASTA ALL'INTERNO.**
- **NON COLLOCARE LA BORSA A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE MA AVVOLGERLA SEMPRE CON UN PANNO DI COTONE O SPUGNA. NON COLLOCARE LA BORSA A CONTATTO DIRETTO DI FERITE APERTE E TRAUMI. CONTIENE LATTICE DI GOMMA.**

Svuotamento e conservazione: dopo l'uso, svitare il tappo e svuotare la borsa. Per evitare la formazione di muffe, appenderla senza il tappo inserito e lasciare scolare, con il bocchettone rivolto verso il basso, sino al completo asciugamento della superficie interna.

Per riporla nei mesi caldi, spolverare all'interno una piccola quantità di talco e chiuderla con il tappo. Conservare la borsa in luogo asciutto e al riparo dalla luce.

Smaltimento: smaltire secondo le normative vigenti.



Il Calore a portata di Mano



Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it

