

SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe Im.

Destinazione d'uso: Sfigmomanometro con bracciale chiusura a strappo, cuscinetto in gomma, soffiaria completa di valvola.

Fonendoscopio in metallo con archetto biauricolare per auscultazione.

Composizione: Camera d'aria: PVC, lattice e TPU; custodia in plastica con chiusura a lampo. Bracciale con chiusura a strappo.

Accessori inclusi con il dispositivo:

- custodia in plastica con chiusura lampo.
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria a due tubi in TPU
- manometro
- monopalla in PVC
- istruzioni per l'uso

CARATTERISTICHE

Diametro del manometro

Campo di misurazione

Accuratezza

Bracciale in dotazione

Bracciali disponibili

Gonfiaggio e sgonfiaggio

SPECIFICHE

50 mm

0-300 mmHg

+/- 3 mmHg

Modello adulti con anello in metallo

Bambini: cm 38 x 7

Ragazzi: cm 45 x 10

Adulti: cm 50 x 14

Obesi: cm 60 x 17

Manuale

CODICE	BARCODE	Modello
909196949	 A909196949	con fonendoscopio
909071375	 A909071375	senza fonendoscopio



SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Schema di funzionamento/utilizzo:**

- Mettersi in posizione rilassata e comoda.
- Posizionare il braccio ad altezza del cuore. Stendere il braccio, non tenere i muscoli contratti. Appoggiare il braccio su una superficie piana, come un tavolo o una scrivania, con il palmo della mano sinistra rivolto verso l'alto.
- Tenere il braccio fermo durante la misurazione.
- Posizionare il bracciale 2-3 cm sopra la piega del gomito sulla parte superiore del braccio sinistro; chiudere premendo il velcro, facendo attenzione che non sia né troppo stretto né troppo largo. Si devono potere inserire uno o due dita tra il bracciale ed il braccio. Non mettere il bracciale sopra i vestiti.
- Per il bracciale a D-ring metallico, prendere l'estremità del bracciale, tirare sopra la staffa di metallo verso sinistra e fissare premendo il velcro.
- La testina del fonendoscopio deve essere posizionata sotto il bracciale in corrispondenza dell'arteria brachiale; per assicurarsi che sia posizionato correttamente, sentire il battito dell'arteria con la punta delle dita.

Manutenzione e precauzioni d'utilizzo:

- Non esporre il bracciale a diretto contatto con la luce solare.
- Fare attenzione che il bracciale o i suoi componenti non entrino in contatto con oggetti appuntiti.
- Non gonfiare il bracciale oltre 300 mmHg.
- Sgonfiare sempre il bracciale prima di riporlo.
- Riporre sempre lo strumento dopo l'uso.
- Pulire il manometro e la monopalla con un panno umido.
- Strumento non sterilizzabile.
- **Pulizia del bracciale e camera d'aria:** Rimuovere prima la camera d'aria in TPU interna al bracciale e procedere alla pulizia della stessa e dei relativi tubi con un panno umido.
- La superficie velcro del bracciale può essere pulita solamente con un panno umido. La superficie restante del bracciale può essere lavata con acqua fredda e sapone, risciacquata con acqua corrente. Asciugare all'aria aperta. Non stirare.
- Si raccomanda di pulire il bracciale prima che venga applicato ad un paziente successivo o se rimane inutilizzato a lungo.
- Chiudere la valvola di scarico dell'aria (posta sopra la monopalla), ruotandola in senso orario.
Fare attenzione che non sia troppo stretta.
- Premere la monopalla di gonfiamento con la mano e con un ritmo regolare.

Conservazione e manipolazione del dispositivo:

- Conservare lo strumento alla seguente temperatura: da -20° C a 70° C con umidità dell'aria relativa dell' 85% (non condensata).

Modalità di smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.**Ricambi:**

- **Cod. 904743402** - Bracciale c/camera d'aria 2 tubi e anello in metallo mod. ADULTI cm. 50x14.
- **Cod. 932773144** - Bracciale c/camera d'aria 2 tubi e anello in metallo mod. RAGAZZI cm. 45x10.
- **Cod. 904743414** - Bracciale c/camera d'aria 2 tubi e anello in metallo mod. BAMBINI cm. 38x7.
- **Cod. 901069310** - Bracciale c/camera d'aria 2 tubi e anello in metallo mod. OBESI cm. 60x17.
- **Cod. 904743426** - Monopalla con valvola posteriore e valvola regolazione aria.
- **Cod. 900726542** - Manometro.

