

SOCIETA' CERTIFICATA UNI EN ISO 13485:2016

Via A. Gramsci, n.8/10/12/14 40018 San Pietro in Casale (BO) Tel.: 051.811905 · Fax: 051.811185

www.farmacare.it - commerciale@farmacare.it

Bastone Legno Imp. Fis. Marmorizzato Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.













Portata massima





Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Ideale per coloro che necessitano di sostegno durante la deambulazione.

Caratteristiche e Materiali

Composizione: Canna: Legno di faggio / Impugnatura: Metacrilato

Caratteristiche tecniche:

- Portata massima: 100 Kg.

- Diametro puntale bastone donna: 20 mm. Diametro puntale bastone uomo: 22 mm.

- Altezza: 92 cm.

- Peso del bastone: 0,3 Kg.

Istruzioni di utilizzo:

- La posizione eretta dell'utilizzatore identifica un corretto utilizzo del bastone (a 90° con la superficie del terreno).
- Non posizionare l'estremità della canna troppo distante dal corpo.
- Utilizzare sempre il puntale della misura corretta.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
906790858	BASTONE LEGNO DONNA IMP.FIS.MARMORIZZATO	A906790858
906790579	BASTONE LEGNO <i>UOMO</i> IMP.FIS.MARMORIZZATO	A906790579

Avvertenze: Per la pulizia usare solo detergenti neutri. Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi. Controllare che il peso dell'utilizzatore sia compreso nella portata massima del dispositivo. La vita utile del dispositivo è di 24 mesi. Non utilizzare il dispositivo per scopi differenti da quelli riportati nella destinazione d'uso.

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

