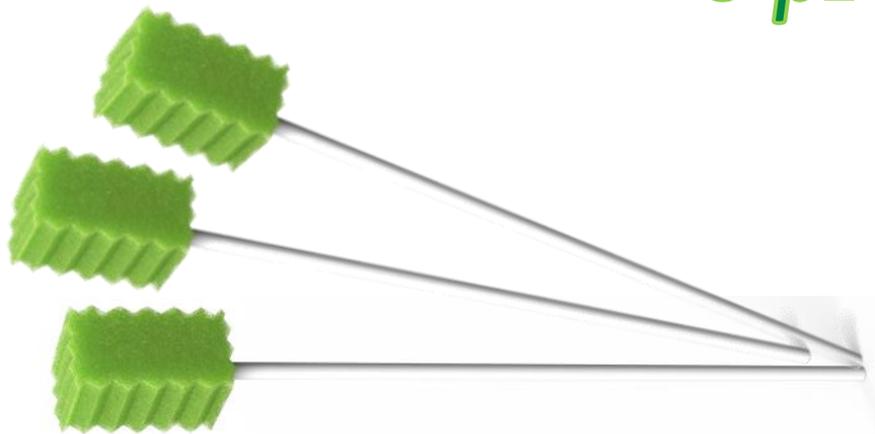


BASTONCINO PER PULIZIA CAVO ORALE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

5 pz – 20 pz

Non sterile *Bastoncino confezionato singolarmente*

Classificazione:

Dispositivo Medico di Classe I non sterile.

Destinazione d'uso:

Il dispositivo medico è destinato alla pulizia del cavo orale per pazienti con disabilità motorie. Il prodotto deve essere utilizzato da operatori professionali.

Descrizione prodotto:

Ogni dispositivo è composto da un bastoncino che permette una salda impugnatura e una piccola spugna. La spugna è dotata di due facce lisce per una pulizia delicata e tre facce rugose per una pulizia più approfondita ed una efficace rimozione dei residui. Monouso. Il confezionamento di un singolo bastoncino in una singola busta garantisce la massima igiene e permette la protezione del dispositivo fino al momento dell'utilizzo.

Composizione:

Spugna: Schiuma in poliuretano

Bastoncino: Polipropilene – Adesivo conforme al ROHS (Limitazione delle sostanze pericolose).



BASTONCINO PER LA PULIZIA CAVO ORALE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

5 pz – 20 pz**Caratteristiche:**

- Lunghezza del bastoncino: circa 15 cm;
- Dimensioni della spugna: Larghezza circa 1.3 cm. – Lunghezza 2.6 cm;
- Capacità di resistenza alla trazione della spugna circa 17 Newton;
- Colore verde;
- Ogni bastoncino è confezionato in una singola busta in confezioni da 20 o 5 pezzi. ;

Istruzioni per l'uso:

- Il dispositivo è dotato di due facce lisce per una pulizia delicata e tre facce rugose per una pulizia più approfondita e più efficace rimozione dei residui.
- Prima dell'uso controllare che la confezione non sia danneggiata.
- Aprire la confezione del singolo bastoncino ed estrarlo.
- Prima si eseguire la pulizia del cavo orale applicare la preparazione idratante abituale, decisa dall'operatore .

Raccomandazioni e avvertenze:

- Il dispositivo è destinato ad un uso professionale ed è indicato esclusivamente per le indicazioni d'uso riportate.
- Non inserire il bastoncino oltre il cavo orale per evitare il rischio di soffocamento.
- Dopo l'uso verificare che non siano rimasti residui di spugna nel cavo orale.
- Il dispositivo è monouso.
- Non usare se la confezione è danneggiata.
- Usare subito dopo l'apertura della confezione.
- Proteggere da luce solare e da umidità.
- Il riuso comporta rischi per il paziente.

Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE
 A978981963	978981963	BASTONCINO PER LA PULIZIA CAVO ORALE - 20 pz
 A905896775	905896775	BASTONCINO PER LA PULIZIA CAVO ORALE - 5 pz

