

Bastoni da passeggio in lega

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Linea con disegni Fiori, Rombi e Righe



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

I bastoni da passeggio sono dispositivi indicati per la deambulazione e consentono un maggiore appoggio. Aumentano la stabilità dell'utilizzatore e permettono di scaricare il peso dell'arto inferiore interessato.

Descrizione e Caratteristiche



Struttura: la struttura tubolare è completamente in lega di alluminio, trattata con vernice.

È caratterizzata da una innovativa gamma di disegni che rende il dispositivo un prodotto moderno, fantasioso e gradevole all'aspetto.

Composizione: Canna: Alluminio / Impugnatura: Metacrilato (Modello rombi) – Legno (Modelli fiori e righe)

Caratteristiche tecniche: Portata massima: 100 Kg • Ø Punta: 19 mm (Modelli rombi e righe) – Ø 16 mm. (Modello fiori) • Altezza regolabile: da 76 a 99 cm • Peso del bastone: 0,3 Kg

Istruzioni di utilizzo: La posizione eretta dell'utilizzatore identifica un corretto utilizzo del bastone (a 90° con la superficie del terreno). Non posizionare l'estremità della canna troppo distante dal corpo. Utilizzare sempre il puntale della misura corretta.

DESCRIZIONE	CODICE	BARCODE
BASTONE PASSEGGIO IN LEGA <i>FIORI</i> IMP. LEGNO	986008086	 A986008086
BASTONE PASSEGGIO IN LEGA <i>ROMBI</i> IMP. SOFT	986008098	 A986008098
BASTONE PASSEGGIO IN LEGA <i>RIGHE</i> IMP. LEGNO	986008100	 A986008100

Pulizia e manutenzione: Pulire regolarmente l'impugnatura con acqua e sapone neutro. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Avvertenze: Controllare che il peso dell'utilizzatore sia compreso nella portata massima del dispositivo. La vita utile del dispositivo è di 24 mesi. Non utilizzare il dispositivo per scopi differenti da quelli riportati nella destinazione d'uso.

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it



Distribuito da FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia / Tel. 051.811905
www.farmacare.it / commerciale@farmacare.it

