

Cuscinetto gel Caldo/Freddo

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Sacchetto
in Polietilene
in dotazione**

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Destinazione d'uso: il dispositivo ha la funzione di poter essere utilizzato sia come un cuscinetto raffreddante (se messo in Freezer) e sia come un cuscinetto riscaldante (se messo in microonde). Per la terapia del freddo è indicato nel caso di ematomi, distorsioni, traumi e ipertermie. Per la terapia del caldo è indicato invece nel caso di lombaggini, torcicollo, reumatismi e ipotermie.

Descrizione: Riutilizzabile. Messo in freezer per almeno 2 ore diventa una borsa del ghiaccio, messo in acqua bollente per 5 minuti o nel microonde per max 60 secondi a 650 Watt, diventa una borsa dell'acqua calda. In entrambi i casi utilizzare inserendo il cuscinetto all'interno del sacchetto in PE in dotazione. Misura cm. 14x24 - gr. 370.

Composizione: Glicole propilenico, blu di metilene, idrossietilcellulosa e acqua.

Avvertenze: Non ingerire il contenuto. Non utilizzare a contatto con la cute lesa.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

