

# Fermapolso - mis. Unica

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I.**DESTINAZIONE D'USO:**

Il dispositivo consente l'immobilizzazione del polso dell'utilizzatore garantendo la somministrazione, in sicurezza, di terapie endovenose.

**COMPOSIZIONE:****Gallone:** Cotone 100%.**Tessuto esterno:** 100% Poliammide o Poliestere (a seconda della fornitura).**Parte interna:** 100% Poliuretano base etere.**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Misura unica. Colore blu o nero secondo la disponibilità.

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Indossare il polsino e fissarlo con lo strappo. Annodare i lacci dopo averli fissati al polsino con lo strappo. Assicurare i lacci alla struttura del letto. Per ottenere una maggiore stabilità è possibile fissare i lacci in due diversi punti della struttura del letto.

**MANUTENZIONE:**

Lavare in acqua tiepida a 30° con detersivo per capi delicati. Non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.


**AVVERTENZE:**

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

**SMALTIMENTO:**

Dopo l'uso smaltire secondo le normative vigenti.

DESCRIZIONE	CND	BARCODE
Fermapolso misura UNICA	Y122406	 A971134616

