

# GHIACCIO Istantaneo con UREA

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe IIa.**Destinazione d'uso:**

Grazie all'azione lenitiva che il freddo esercita, l'uso immediato del GHIACCIO Istantaneo con UREA è indispensabile in tutte le situazioni di primo soccorso e in tutti i casi in cui sia indicato l'uso del freddo. Il rapido raffreddamento della parte interessata contrasta, in maniera efficace, le conseguenze di eventuali traumi (ematomi, gonfiori, piccole emorragie). L'utilizzo è particolarmente indicato durante lo sport, il tempo libero, sui luoghi di lavoro, contro nevralgie (per es. mal di denti), strappi muscolari, distorsioni, contusioni, colpi di calore, punture di insetti, contatto con sostanze urticanti, dopo interventi di piccola chirurgia (estrazioni dentali, trattamenti estetici, ecc.)

**Descrizione:**

Disponibile in confezione singola o in astuccio da 2 pz. (l'astuccio 2 pz contiene anche una foderina in TNT per l'utilizzo sul viso e/o parti particolarmente delicate e sensibili). Per stabilizzare il contatto della busta con la parte interessata è possibile utilizzare una fascia elastica (non in dotazione).

**Composizione:** Urea e acqua**Modo d'uso:** Attivare il GHIACCIO Istantaneo con UREA dando un colpo secco e deciso alla busta, con la mano chiusa, oppure premendo con i due pollici sulla busta per causare la rottura della "bolla d'acqua" contenuta all'interno.

Agitare la busta per avere un freddo immediato. Interporre un panno tra la busta e la cute; applicare alla parte interessata. Ulteriori informazioni sulla conservazione, avvertenze e precauzioni sono indicate sul prodotto.

**Avvertenze:** Non ingerire e nel caso si dovesse ingerire consultare il Medico. Non utilizzare a diretto contatto con la cute lesa. In caso di problemi circolatori o insensibilità cutanea utilizzare solo sotto consiglio del proprio Medico curante. Utilizzare la busta solo se perfettamente sigillata. Il Dispositivo ha valenza temporanea: Utilizzare solo per meno di 60 minuti.**Smaltimento:**

Dopo l'uso smaltire secondo le normative vigenti.

