

Gomitiera/Talloniera

in poliestere - 2 pezzi

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.****Destinazione d'uso:**

Prevenzione delle piaghe da decubito ai gomiti e talloni nei pazienti lungodegenti a rischio.

Munite di disco supplementare per aumentarne l'efficienza.

Composizione:

Poliestere 100% con chiusura a strappo regolabile

Istruzioni per l'utilizzo:

Indossare la gomitiera/talloniera fissandola con l'apposita chiusura a strappo regolabile.

Per aumentarne l'efficienza, è possibile posizionare il disco supplementare (fornito in dotazione) in corrispondenza del punto critico di appoggio.

**Indicazioni di lavaggio e conservazione:**

Lavabile in lavatrice a 30°C con sapone neutro. Non stirare. Asciugare lontano da fonti di calore.

**Avvertenze e controindicazioni:**

Seguire le indicazioni del Medico curante.

Non utilizzare questo indumento su ferite aperte.

Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi.

Sostituire il prodotto quando risulta consumato.

Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	REP (Numero di Repertorio)
909068405	Gomitiera/Talloniera in Poliestere - PP	 A909068405	V0811	2340749

