

Gomitiera/Talloniera siliconata in fibra cava siliconata

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Destinazione d'uso: Indicato per prevenire le piaghe da decubito nei gomiti o nei talloni.

Caratteristiche: Specificamente studiati sia nella forma che per i materiali impiegati, questi dispositivi sono particolarmente morbidi grazie alla speciale imbottitura in fibra cava siliconata (100% poliestere).

La quantità di fibra cava impiegata garantisce una buona ripartizione delle pressioni di appoggio ed un notevole comfort. Fodera esterna in puro cotone sanforizzato (100% cotone).

Dimensioni:

Gomitiera: Larghezza cm. 35 - Profondità cm. 24 / **Talloniera:** Larghezza cm. 15 - Profondità cm. 20 - Altezza cm. 16

Istruzioni per l'uso: Posizionare la gomitiera/talloniera intorno al gomito/tallone e regolare la chiusura a strappo.

Manutenzione e pulizia: Lavare a mano con saponi neutri ad una temperatura massima di 40°C; sciacquare con abbondante acqua; non centrifugare né strizzare; non utilizzare mai solventi; non candeggiare; non stirare; asciugare lontano da fonti di calore.



Avvertenze: Conservare ed utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore. Si consiglia l'uso ad un solo paziente. Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo. Non utilizzare a contatto con la pelle lesa.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



CODICE	DESCRIZIONE	CND (Codice classificazione nazionale)	REP (Numero di repertorio)	BARCODE
906468956	Gomitiera - 1 pz.	V0811	2411737/R	 A906468956
906468982	Talloniera - 1 pz.	V0811	2411738/R	 A906468982

