

Imbragatura con Mutanda

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**DESTINAZIONE D'USO**

IL DISPOSITIVO È DESTINATO A STABILIZZARE LA POSTURA DI PERSONE COSTRETTE SU SEDIE A ROTELLE O SU POLTRONE, PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO IN AVANTI DEL BACINO E CONSENTIRE IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE ERETTA DEL TRONCO.

**COMPOSIZIONE:**

Gallone: cotone 100%.
Mutanda: cotone 90% - viscosa 10%.
Fibbia tridente: plastica acetilica mm40 (resistenza 100 kg).
Latex Free.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura unica. Colore blu.

CONFEZIONE PRIMARIA:

1 pz confezionato in sacchetto plastico.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Posizionare l'imbragatura sulla seduta della carrozzella avendo cura che la patta con i tridenti sia appoggiata sullo schienale della stessa.
2. Far sedere il paziente sulla carrozzella e appoggiare la patta con le anelle in acciaio, sullo stomaco.
3. Far passare i galloni con fibbie in plastica, all'interno delle anelle metalliche ed agganciarle dietro allo schienale.

CONTROINDICAZIONI: Se segnalate dal medico curante.

MODALITA' DI TRASPORTO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Lavare in acqua tiepida a 30° con detersivo per capi delicati. Non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Dopo l'uso smaltire secondo le normative vigenti.