

Linea Antiacaro Farmacare

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Copricuscino e Coprimaterasso

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

*Protezione completa contro gli acari
della polvere ed i loro allergeni*

Destinazione d'uso:

Dispositivo studiato per persone affette da allergie agli acari della polvere e il trattamento delle relative patologie respiratorie.

Composizione:

Poliestere 100% (PE 100%) Materiale conforme allo Standard OEKO-TEX.

Caratteristiche tecniche:

- Fabbricati in tessuto innovativo non spalmato, antibatterico, traspirante ed idrorepellente, con proprietà antiacaro certificate da test di laboratorio.
- Leggerissimi e confortevoli.
- Facilmente lavabili - asciugano velocemente e possono essere stirati.
- Richiudibili tramite cerniera.
- Efficacia antiacaro garantita 10 anni, purché vengano rispettate le istruzioni di pulizia indicate.

Principio di funzionamento:

La biancheria antiacaro Farmacare® crea una barriera impenetrabile tra Voi e gli acari della polvere. Previene quindi le allergie e aiuta a tenerle sotto controllo. Coprire il materasso e il cuscino è una misura fondamentale ed efficace per combattere gli acari dall'ambiente domestico, essendo tali superfici fra gli habitat preferiti dagli acari stessi. Questa biancheria è realizzata con l'impiego di fili finissimi che, tessuti l'uno sull'altro in ogni direzione, formano una barriera ottimale.

Linea Antiacaro Farmacare

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Copricuscino e Coprimaterasso





Istruzioni per l'uso:

Inserire il materasso o il cuscino e richiudere la cerniera.
Fare attenzione ai ganci delle reti in metallo, che possono causare strappi.
Prima dell'uso controllare l'integrità del prodotto.

Pulizia:

I dispositivi della linea antiacaro possono essere lavati in lavatrice con temperatura consigliata di 60 °C, non più di due volte all'anno.
La superficie può essere anche pulita con un panno in microfibra umido senza utilizzare solventi o prodotti chimici.
Inoltre possono essere stirati a media temperatura.

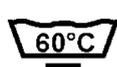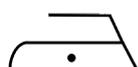

Avvertenze e controindicazioni:

Utilizzare e conservare lontano da fonti di calore.
Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti o taglienti.
Non utilizzare a contatto con la pelle lesa.
Quando non utilizzati, riporre con cura in luogo protetto dalla polvere.

Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.



CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE	CND (CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI)	REP (NUMERO DI REPERTORIO)
930184433	Coprimaterasso Singolo Mis. 200x90x20 cm.	 A930184433	V9099	2341011
930184458	Coprimaterasso Matrimoniale Mis. 200x170x20 cm.	 A930184458	V9099	2341019
930184472	Copricuscino Mis. 50x80 cm.	 A930184472	V9099	2341015

