


# Magnetoterapia a Bassa Frequenza

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

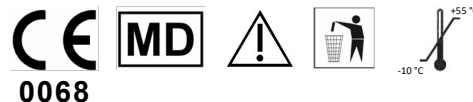

## Apparecchio completo di:

- Fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi
- Alimentatore medicale
- Manuale d'uso e posizioni fascia
- Borsa per il trasporto
- 1 calamita tester

## Classificazione

Dispositivo Medico di Classe IIa

## Destinazione d'uso

L'apparecchio per magnetoterapia a bassa frequenza è particolarmente indicato per il trattamento e la cura della osteoporosi e di tutte le patologie a carico dei tessuti ossei. Grazie alla elevata intensità del campo magnetico che può generare, il dispositivo risulta particolarmente indicato nei trattamenti di fratture ossee anche in presenza di bendaggi rigidi o gessi. È destinato sia all'utente professionale (medico, terapeuta, etc.) che al paziente domiciliare.

## Descrizione

Il Dispositivo è compreso di una fascia elastica a tre solenoidi e di due canali d'uscita che permettono di trattare in maniera indipendente due differenti zone del corpo.

Il dispositivo è dotato di 35 programmi con valori preimpostati e modificabili dall'utente a seconda delle sue esigenze. I primi 20 programmi sono associati al trattamento di patologie specifiche mentre gli ulteriori 15 hanno solamente la frequenza di lavoro prestabilita, lasciando all'utente la libertà di scegliere la durata ed i cicli di sedute. In particolare il programma di Scansione Automatica permette di impostare il tempo di terapia desiderato, gestendo poi automaticamente il ciclo di frequenze da 5 Hz a 100 Hz con 5 minuti di terapia per ciascuna frequenza (programma ideale per la rigenerazione di tessuti ossei, tendini, cartilagini ma anche molli, nella stessa seduta di trattamento).



# Magnetoterapia a Bassa Frequenza

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Avvertenze:**

L'utilizzo del dispositivo è controindicato in pazienti in stato di gravidanza, tubercolosi, diabete giovanile, malattie virali (in fase acuta), micosi, soggetti con cardiopatie, aritmie gravi o portatori di pacemaker, bambini, portatori di protesi magnetizzabili, infezioni acute, epilettici (salvo diverse prescrizioni mediche). In caso di terapia domiciliare, si raccomanda l'uso del dispositivo esclusivamente su indicazione del medico/terapista. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Non tenere in mano il Dispositivo durante l'utilizzo.

**Pulizia e manutenzione:**




La calamita tester data in dotazione permette di effettuare un approssimativo controllo del dispositivo, seguendo le indicazioni scritte nel manuale d'uso. Si suggerisce inoltre di rimuovere le tracce di polvere dopo ogni utilizzo.

**Smaltimento:**

Smaltire secondo le normative vigenti dei rifiuti elettronici.

**Vita utile del Dispositivo\*:**

2 anni

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Barcode
939468930	MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA	179 x 107 x 50 mm.	 A939468930
984826418	FASCIA PROFESSIONALE PER MAGNETOTERAPIA	con 2 Solenoidi separati	 A984826418
984826420	FASCIA PROFESSIONALE PER MAGNETOTERAPIA	con 3 Solenoidi	 A984826420

\* Farmacare specifica che per vita utile si intende il periodo durante il quale ci si aspetta che il dispositivo rimanga idoneo per l'uso previsto, o, in altri termini, il periodo accettabile di utilizzo in servizio. Una vita utile di 2 anni non implica che dopo tale periodo il dispositivo e i suoi accessori non debbano più funzionare ma piuttosto che è consigliato un controllo da parte del Fabbricante per appurare che le caratteristiche di sicurezza e prestazione siano rimaste invariate. Il numero di assistenza del Fabbricante è: 041.5401356.