

Provetta Sterile Campionamento

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Urine 12 ml.**Classificazione:** Dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD).**Destinazione d'uso:**

Raccolta e conservazione di urina da sottoporre ad analisi o test clinici e/o diagnostici.

Caratteristiche:

- Provetta sterile 12ml. in polistirolo
- Graduata (da 2ml. a 12ml. Intervalli di 2ml)
- Imboccatura larga e punta svasata
- Tappo a pressione in polietilene
- Completa di etichetta adesiva per scrittura dati paziente
- Sterilizzata a raggi beta
- Confezionata singolarmente in astuccio
- Confezione multipla da 100 pz.

Istruzioni per l'uso:

- Aprire l'involucro protettivo
- Scrivere sull'apposita etichetta i propri dati
- Raccogliere l'urina nella provetta
- Chiudere accuratamente la provetta con il tappo a pressione
- Consegnare al laboratorio d'analisi

Avvertenze:

- Non aprire la confezione prima dell'utilizzo
- Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato oppure a confezione aperta
- Non utilizzare in caso di fuoriuscita
- Utilizzare secondo quanto indicato; ogni utilizzo diverso è da ritenersi improprio
- Conservare lontano da fonti di calore

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.