

# Protezione oculare

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



## CLASSIFICAZIONE

Dispositivo Medico di Classe I

## DESTINAZIONE D'USO

La "protezione" è utilizzabile, quando prescritta dal Medico, dopo un intervento di tipo oculistico e va posizionata in modo che la bombatura sia rivolta all'esterno per permettere alla palpebra tutti i movimenti e costituire un riparo alla zona operata. La "protezione" oculare è progettata per essere utilizzata indifferentemente su entrambi gli occhi.

## MATERIALE E CARATTERISTICHE

Prodotta con POLIMERO BDS K-RESIN materiale atossico, anallergico, infrangibile e trasparente. Il contatto con la "Protezione" e la pelle è reso atraumatico dall'arrotondamento del bordo di contatto. I nove fori posti al centro della "Protezione" hanno un diametro di 5 mm. per non consentire l'introduzione di corpi contundenti. I due forellini del diametro di 2 mm. posti ai lati della "Protezione", sono creati per permettere l'introduzione di un elastico onde evitare l'uso di cerotti per fermare il dispositivo sulla pelle del paziente che potrebbero creare irritazioni. La "Protezione" è costruita per poter resistere ad uno schiacciamento di 25 kg.

**DIMENSIONI: 83 x 62 - 22 mm (punta).**

## MANUTENZIONE E LAVAGGIO

**MANUTENZIONE:** per motivi igienici, la protezione oculare deve essere utilizzata da una sola persona.**LAVAGGIO:** per il riutilizzo si consiglia il lavaggio accurato con acqua calda e detergente antisettico.

DESCRIZIONE	CODICE	BARCODE	CND
PROTEZIONE OCULARE TRASPARENTE	905351312	 A905351312	Q029001

**AVVERTENZE:** Non esporre a fonti di calore per evitare deformazioni e deterioramento. Dispositivo monopaziente. Dispositivo medico ad uso esterno. NON STERILIZZARE IN AUTOCLAVE.**SMALTIMENTO:** Smaltire secondo le Normative vigenti.