


Raddrizzaspalle Elastico Millerighe

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

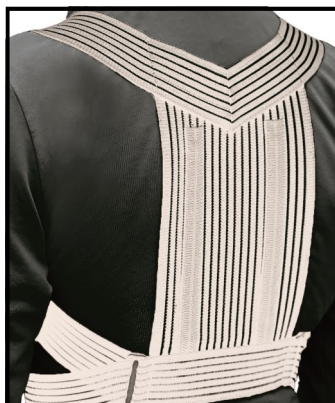

* Misurare la circ. sotto al seno per individuare la taglia.

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso:

Raddrizzaspalle indicato per cifosi giovanili e patologie minori da rachide dorsale, dovute a posture coatte errate (impiegati, studenti).

Indicato inoltre per mantenere la corretta postura nelle attività sportive.

Composizione: Cotone 48% - Poliammide 41% - Gomma 11%

COLORE NERO E BIANCO

Lavaggio: Lavare in acqua tiepida a 30° con detersivo per capi delicati. Non strizzare, non centrifugare e asciugare lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

CIRCONF. VITA	CODICE MINSAN	BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
cm. 65 - 90	924994890	 A924994890	M030501
cm. 90 - 125	924994902	 A924994902	M030501



Raddrizzaspalle Elastico

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso: Raddrizzaspalle indicato per cifosi giovanili e patologie minori da rachide dorsale dovute a posture coatte errate (impiegati, studenti). Indicato inoltre per mantenere la corretta postura nelle attività sportive.



COLORE ECRÙ



Descrizione:

Realizzato con elastici morbidi, felpati e garzati. Regolabile anteriormente con adesivo cm. 5.

Istruzioni:

Infilare le braccia nelle bretelle in modo che l'elastico con la chiusura a strappo giri verso il dorso: incrociare i due tiranti nel centro del

dorso all'altezza dell'angolo basso delle scapole; chiudere sul davanti all'altezza dello stomaco regolando la tensione con la chiusura a strappo.

Composizione: Cotone 24% - Viscosa 24% - Elastico 23% - Poliammide 16% - Poliestere 13%.

Lavaggio: Lavare in acqua tiepida a 30° con detersivo per capi delicati. Non strizzare, non centrifugare e asciugare lontano da fonti di calore.

Controindicazioni: se segnalate dal medico curante.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

CIRCONF. VITA	CODICE MINSAN	MISURA	BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
cm. 68 - 76	900650146	3°	 A900650146	M030501
cm. 76 - 84	900650159	4°	 A900650159	M030501
cm. 84 - 90	900650161	5°	 A900650161	M030501

