

# Remover Spray 50ml. per adesivi medicali

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I**

**Destinazione d'uso:** Consente una facile, veloce e indolore rimozione degli adesivi medicali.

Particolarmente indicato per la rimozione di:

- \* *Sacche per ileostomia*
- \* *Sacche per colostomia*
- \* *Sacche per urostomia*
- \* *Cerotti medicati, cerotti per medicazione, bendaggi per taping ecc.*



La formulazione:

- ◆ **È priva di alcool**, per evitare bruciore sulla cute.
- ◆ **È priva di grassi**, per non lasciare residui unti favorendo così la successiva applicazione di adesivo.

Il propellente è isolato dal principio attivo:

- ◆ **nessuno shock termico** quando si spruzza il prodotto sulla cute.
- ◆ **delicato** sulla cute.

L'innovativa valvola interna **BOV (BAG ON VALUE)** di cui è dotato il flacone, consente:

- ◆ di ottenere una **distribuzione ottimale**.
- ◆ di spruzzare il prodotto da qualsiasi angolazione (360° di azione) in modo da raggiungere agevolmente qualsiasi zona del corpo.
- ◆ di consumare tutto il contenuto del flacone (50 ml) senza residui né sprechi.

Dopo l'uso non è necessario il lavaggio della zona cutanea per rimuovere il prodotto.

Si asciuga velocemente consentendo l'immediata applicazione di un nuovo adesivo medicale.

# Remover Spray 50ml. per adesivi medicali

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Istruzioni per l'uso:**

Spruzzare direttamente sul bordo della compressa adesiva da rimuovere e attendere alcuni secondi.  
Tirare con delicatezza per staccare la compressa adesiva dalla pelle.  
Se necessario, spruzzare nuovamente per rendere più facile la completa rimozione.  
Quando la soluzione è evaporata è possibile l'applicazione di una nuova compressa adesiva.

**Avvertenze:**

Usare solamente come sopra indicato. **Evitare il contatto con gli occhi e le orecchie. Solo per uso esterno.**  
In caso di dubbio, prima dell'uso effettuare una prova in una piccola zona. Interrompere l'uso se appaiono irritazioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**Attenzione!** Recipiente pressurizzato.

Proteggere dalla luce del sole e non esporre a temperature superiori a 50°C.  
Non forare o bruciare il contenitore dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Dispositivo altamente infiammabile.

**Specifiche tecniche:**

- ◆ *Composizione:* Miscela di Silossani.
- ◆ *Forma fisica:* Non tossico e non citotossico.
- ◆ *Particolarità cliniche:* studiato come dispositivo monopaziente.

**Smaltimento:** Smaltire secondo le norme vigenti.

CODICE MINSAN	BARCODE
923555116	 A923555 1 16

