

Rialzo WC universale morbido

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Impareggiabile
comfort e
sicurezza

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I.

Destinazione d'uso: Facilitare la seduta al WC alle persone con problemi a sedersi e/o rialzarsi dal water. Indicato soprattutto per anziani o disabili.

Caratteristiche: Grazie alla sua morbidezza assicura un comfort ineguagliabile • Si adatta alla maggior parte dei WC standard • Permette di rialzare la seduta del WC di cm.11.

Materiale: Schiuma ad alta resilienza e PVC • **Colore:** bianco ghiaccio • **Portata massima:** Kg. 185
Dimensioni interne: cm. 21x27 • **Dimensioni esterne:** cm. 37x40 • **Altezza:** cm. 11 • **Peso:** Kg. 2

Istruzioni d'uso:

- Sollevare il coperchio e la tavoletta del WC e posizionare il rialzo sul WC con la punta rivolta verso sé stessi.
- Le labbra di fissaggio situate sotto il sedile devono essere ripartite da una parte all'altra del bordo della tazza del WC, in modo da fissare il rialzo sulla tazza stessa.
- Premere il rialzo fino al completo appoggio.
- Dopo l'installazione verificare la stabilità del sedile muovendolo lateralmente.
- Se il rialzo non risulta ben fissato, ripetere le operazioni precedenti.
- Per rimuovere il rialzo, ripetere le operazioni elencate in modo inverso a quanto descritto.

Pulizia e manutenzione: Lavare quotidianamente con acqua e detersivi antisettici, delicati e neutri; non usare detersivi a base alcolica e/o solventi; asciugare all'aria.

Avvertenze: Verificare il corretto fissaggio e la stabilità prima dell'uso – Conservare al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore – Utilizzare il dispositivo solo se è ben fissato.

Smaltimento:

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CND: Y091215



A909844514

