


SET LAVATESTA BASIC

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

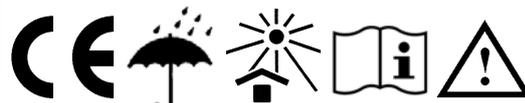

Destinazione d'uso:

I Set Lavatesta sono stati progettati per consentire il lavaggio dei capelli di pazienti allettati (temporaneamente o in maniera definitiva) permettendo loro di rimanere comodamente sdraiati a letto.

Descrizione del prodotto:

I **Set Lavatesta** gonfiabili sono realizzati in PVC.

Il **Set Lavatesta Completo Basic** comprende un contenitore rotondo lavatesta con doppio bordo gonfiabile, una pompa per il gonfiaggio del contenitore, una sacca per contenere l'acqua, che incorpora una doccia dotata di rubinetto, con cordoncino per il fissaggio. Il comodo e pratico regolatore manuale, posizionato sulla doccetta della sacca, consente all'operatore di avere una mano libera per effettuare il lavaggio dei capelli.



Set Lavatesta Completo Basic



A974347421

Il **Set Lavatesta Basic** non comprende la sacca con doccia.




Set Lavatesta Basic



A973622374

SET LAVATESTA BASIC

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

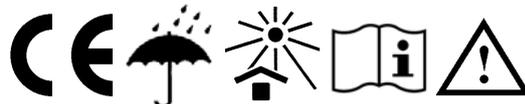

Istruzioni per l'uso:

Gonfiare il prodotto usando la pompa in dotazione e chiudere il tappo.

Posizionare il prodotto gonfiato in corrispondenza della testata del letto su un telo impermeabile steso in precedenza e seguire tutte le indicazioni riportate sul foglio di istruzioni per l'uso incluso nella confezione.

Pulizia e disinfezione:

- Per pulire i vari componenti, non usare oggetti o prodotti abrasivi o appuntiti.
- Tutte le parti devono essere pulite con un panno umido e un detergente delicato.
- Prima di ripiegare e riporre il Set Lavatesta, accertarsi che sia perfettamente asciutto.
- Non asciugare vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Il Set Lavatesta può essere disinfettato utilizzando un disinfettante commerciale, senza cloro.
- Importante: quando si usano disinfettanti, è necessario osservare le istruzioni per l'uso del produttore.

Specifiche Tecniche:

Materiali: Contenitore gonfiabile rotondo (di colore blu), dispositivo doccia (se presente), tubo di drenaggio: PVC

Cordoncino per appendere la sacca: Nylon

Dimensioni: Contenitore gonfiabile rotondo diametro circa 57 cm – Tubo scarico lunghezza 70 cm.

Sacca con doccia circa 50 x 33 cm, capacità 6 Lt - Lunghezza tubo doccia circa 54 cm.

Vita del prodotto: circa 5 anni se usato domesticamente.

Se si vuole utilizzare un contenitore pluripaziente, si suggerisce di usare un catino di plastica rigida all'interno del prodotto gonfiabile.

Istruzioni di sicurezza:

- Gonfiare il contenitore rotondo o con la bocca o con la pompa in dotazione.
- **Non usare un compressore!** Usare acqua tiepida per evitare ustioni (max 38°C).
- Durante l'uso è indispensabile la presenza di un operatore: non lasciare solo il paziente con il Lavatesta pieno di acqua.
- Controllare con regolarità che non ci siano perdite.
- Non tirare i tubi in quanto si possono danneggiare le saldature!
- Il Set Lavatesta **non è un giocattolo:** utilizzo consentito solo per il lavaggio dei capelli di persone allettate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il cordoncino per appendere la sacca con doccia deve essere fissato saldamente per evitare che cada.