

Sfigmomanometro ad aneroido Mod. Palmare ad 1 tubo

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di classe Im.

Destinazione d'uso: Indicato per la misurazione della pressione arteriosa.

Caratteristiche: Sfigmomanometro con bracciale in nylon con chiusura a strappo e anello in metallo.

Fornito con:

- Bracciale in nylon per adulti
- Custodia in PVC a 1 tubo con chiusura lampo
- Manometro
- Monopalla in PVC
- Istruzioni per l'uso



SPECIFICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE
Diametro del manometro	65 mm
Campo di misurazione	0-300 mmHg
Accuratezza	+/- 3 mmHg
Bracciale in dotazione	Modello adulti con anello in metallo
Bracciali disponibili	Bambini: cm 38 x 7 Ragazzi: cm 45 x 10 Adulti: cm 50 x 14 Obesi: cm 60 x 17
Gonfiaggio e sgonfiaggio	Manuale

Barcode	Descrizione prodotto
 A905301255	Sfigmomanometro ad aneroido palmare ad 1 tubo
 A932773144	Bracciale velcro Ragazzi c/camera aria 2T A/M
 A923507697	Bracciale velcro BB c/camera aria 1T
 A901069310	Bracciale velcro Obesi c/camera aria 2T A/M
 A926407329	Bracciale c/camera d'aria 1 Tubo per Sfigmo
 A904743426	Monopalla c/valvola post. + valvola regolazione aria
 A900726542	Manometro ricambio x Sfigmo aneroido

Sfigmomanometro ad aneroido Mod. Palmare ad 1 tubo

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Schema di funzionamento/utilizzo:

- Mettersi in posizione rilassata e comoda.
- Posizionare il braccio sinistro ad altezza del cuore. Stendere il braccio, non tenere i muscoli contratti. Appoggiare il braccio su una superficie piana, come un tavolo o una scrivania, con il palmo della mano sinistra rivolto verso l'alto.
- Tenere il braccio fermo durante la misurazione.
- Posizionare il bracciale 2-3 cm sopra la piega del gomito sulla parte superiore del braccio sinistro; chiudere tramite il sistema a strappo, facendo attenzione che non sia né troppo stretto né troppo largo.
- Si devono potere inserire una o due dita tra il bracciale ed il braccio.
- Non mettere il bracciale sopra i vestiti.
- Per il bracciale modello D-ring metallico, prendere l'estremità del bracciale, inserirlo nella staffa di metallo, tirare verso sinistra e fissare premendo il sistema a strappo.

Manutenzione e precauzioni d'utilizzo:

- Non mettere il dispositivo a contatto con oggetti appuntiti.
- Non gonfiare il bracciale oltre 300 mmHg.
- Strumento non sterilizzabile.
- **Pulizia: Camera d'aria:** Rimuovere prima la camera d'aria in TPU interna al bracciale e procedere alla pulizia della stessa e del tubo con un panno umido.
- **Bracciale:** La superficie velcro del bracciale può essere pulita solamente con un panno umido. La superficie restante del bracciale può essere lavata con acqua fredda e sapone, risciacquata con acqua corrente. Asciugare all'aria aperta. Non stirare.
- Chiudere la valvola di scarico dell'aria (posta sopra la monopalla), ruotandola in senso orario. Fare attenzione che non sia troppo stretta.

Conservazione e manipolazione del dispositivo:

- Conservare lo strumento alla seguente temperatura: da -20° C a 70° C con umidità dell'aria max. dell'85%.

Standard di riferimento: UNI EN ISO 81060-1:2012 (Sfigmomanometri non invasivi).

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

