

# TERMOMETRO AD INFRAROSSI NON CONTACT

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico Classe IIa

## Descrizione prodotto:

Il dispositivo grazie alla tecnologia ad infrarossi permette la misurazione a distanza della temperatura frontale/corporea nei neonati e negli adulti.

Il termometro è indicato sia per l'utilizzo domestico che professionale.



## Caratteristiche tecniche:

- Misurazioni in massime condizioni igieniche senza contatto con la cute;
- Distanza di misurazione: 3-5 cm. Attendere dai 3 ai 5 secondi tra una misurazione e l'altra;
- 3 modalità di misurazioni:
  - **BODY:** per la misurazione corporea (valori di temperatura inferiori a 32 °C e superiori a 42,9 °C).
  - **SURFACE TEMP:** per la misurazione della temperatura di una superficie (es: biberon/bottiglia/vasca) – (misurazioni temperature di superfici: 0 °C / 60 °C).
  - **ROOM:** per la misurazione della temperatura di una stanza (misurazioni temperature ambientali: 0 °C / 40 °C).
- Indicatore colorato per la segnalazione di presenza di febbre: verde quando inferiore a 37,3 °C - arancione da 37,4 °C a 37,9 °C – rosso da 38 °C e oltre;
- Spegnimento automatico dopo 30 secondi di non utilizzo;
- Funzionamento a batterie (incluse).

## Pulizia:

Si raccomanda di spegnere il Dispositivo prima di iniziare questa procedura: utilizzare un panno morbido leggermente inumidito da acqua tiepida e sapone neutro o alcool isopropilico al 70% e procedere con la pulizia della superficie esterna. Prestare particolare attenzione a non fare entrare all'interno del dispositivo la soluzione liquida utilizzata per la pulizia. Dopo la pulizia non utilizzare il termometro per almeno 30 minuti, finché non è completamente asciutto.

## Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.



A980530859



Importato e distribuito da:



San Pietro in Casale (BO) • Italy  
www.farmacare.it • commerciale@farmacare.it