

# Vello antidecubito sintetico

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Codice ISO 1999: 03.33.06.027****Destinazione d'uso:**

Indicato per persone con ridotta mobilità, pazienti con handicap e per tutti coloro che trascorrono lunghi periodi a letto o seduti.

**Caratteristiche:**

- offre un morbido sostegno grazie alle fibre in poliestere 100%, alte 2 cm., che permettono il passaggio d'aria tra la cute e la superficie d'appoggio, favorendo l'evaporazione del sudore.
- previene la formazione delle piaghe da decubito ed è coadiuvante nella cura laddove le piaghe sono già esistenti.
- unico tra i prodotti disponibili sul mercato, ha una base particolarmente morbida che fornisce il necessario sostegno senza causare un irrigidimento sopra le superfici di appoggio quali il letto, la sedia o la carrozzella.

<b>CODICE MINSAN</b>	<b>BARCODE</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>CND</b> (Classificazione Nazionale Dispositivi)	<b>REP</b> (Numero di Repertorio)
909068518	 A909068518	misura cm. 50 x 70	V080702	2330944
909068520	 A909068520	misura cm. 100 x 70	V080702	2330957



# Vello antidecubito sintetico

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Composizione:** Poliestere 100%.

## Istruzioni per l'utilizzo:

Appoggiare il vello sopra il letto, sedia o carrozzella, assicurandosi che sia ben steso e senza pieghe. E' consigliabile interporre un lenzuolo tra il paziente ed il vello; il prodotto può comunque venire a diretto contatto con la pelle, purché integra e senza alcuna lesione.

Particolarmente indicato in corrispondenza delle prominenze ossee. E' inoltre molto indicato per tutti i pazienti costretti a lunghi periodi di immobilità.

## Manutenzione e precauzioni di utilizzo:

Per una sua maggiore durata, il dispositivo deve essere lavato a mano oppure in lavatrice a bassa temperatura usando il ciclo delicato (30 °C). Usare detersivi consigliati per capi delicati. Non strizzare né stirare. Asciugare all'ombra e comunque lontano da fonti di calore. Spazzolare dopo il lavaggio a pelo asciutto.



## Conservazione e manipolazione del dispositivo:

Quando non è più necessario l'utilizzo del prodotto, stendere un leggerissimo strato di talco sulla superficie opposta al pelo prima di procedere con la piegatura (non arrotolare).

**Controindicazioni:** Se segnalate dal Medico curante.

**Eventuale tossicità dichiarata:** Nessuna.

**Modalità di smaltimento:** Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

